


دستورالعمل نحوه نگهداری و استفاده از مانومتر و کپسول اکسیژن

- ۱- کپسول اکسیژن را پس از پر نمودن حتما در تریالی قرار دهید (حتما تراکی به دیوار محکم شود و به هیچ عنوان آزاد نباشد).
- ۲- مانومتر را به کپسول اکسیژن وصل کنید و در صورت نشتی از واشر استفاده نمایید.
- ۳- شیشه ی آب مقطر را تا دوسوم شیشه یا خط نشانه پر نمایید.
- ۴- حتما پس از پایان کار جهت جلوگیری از انتقال بیماریها شیشه را تخلیه و تمیز کنید.
- ۵- یک سر لوله ی پلاستیکی را به شیشه ی آب مقطر و سر دیگر را به سوند بینی یا ماسک متصل نمایید.
- ۶- برای تست برقراری جریان اکسیژن پیچ کنترل آن را با توجه به فلومتر در حدود ۳ لیتر در دقیقه باز کنید و سپس سر سوند را در لیوان آب قرار دهید، اگر حباب ایجاد شد جریان برقرار است حال پیچ را ببندید.
- ۷- ماسک را روی دهان و بینی فرد گذاشته و بند کشی ماسک را پشت سر ثابت کنید به طوری که از اطراف ماسک اکسیژن خارج نشود. حال پیچ کنترل جریان اکسیژن را باز کنید و طبق دستور پزشک تنظیم نمایید تا جریان برقرار شود.
- ۸- پس از اتمام کار پیچ کنترل جریان و شیر اصلی کپسول را ببندید و کپسول را در محل مناسبی قرار دهید. همچنین لوله ی پلاستیکی، سوند و ماسک را دور بریزید.
- ۹- به هیچ عنوان از روغن بر روی کپسول اکسیژن استفاده ننمائید در اینصورت کپسول منفجر می شود و آسیب وارده بسیار شدید می باشد.

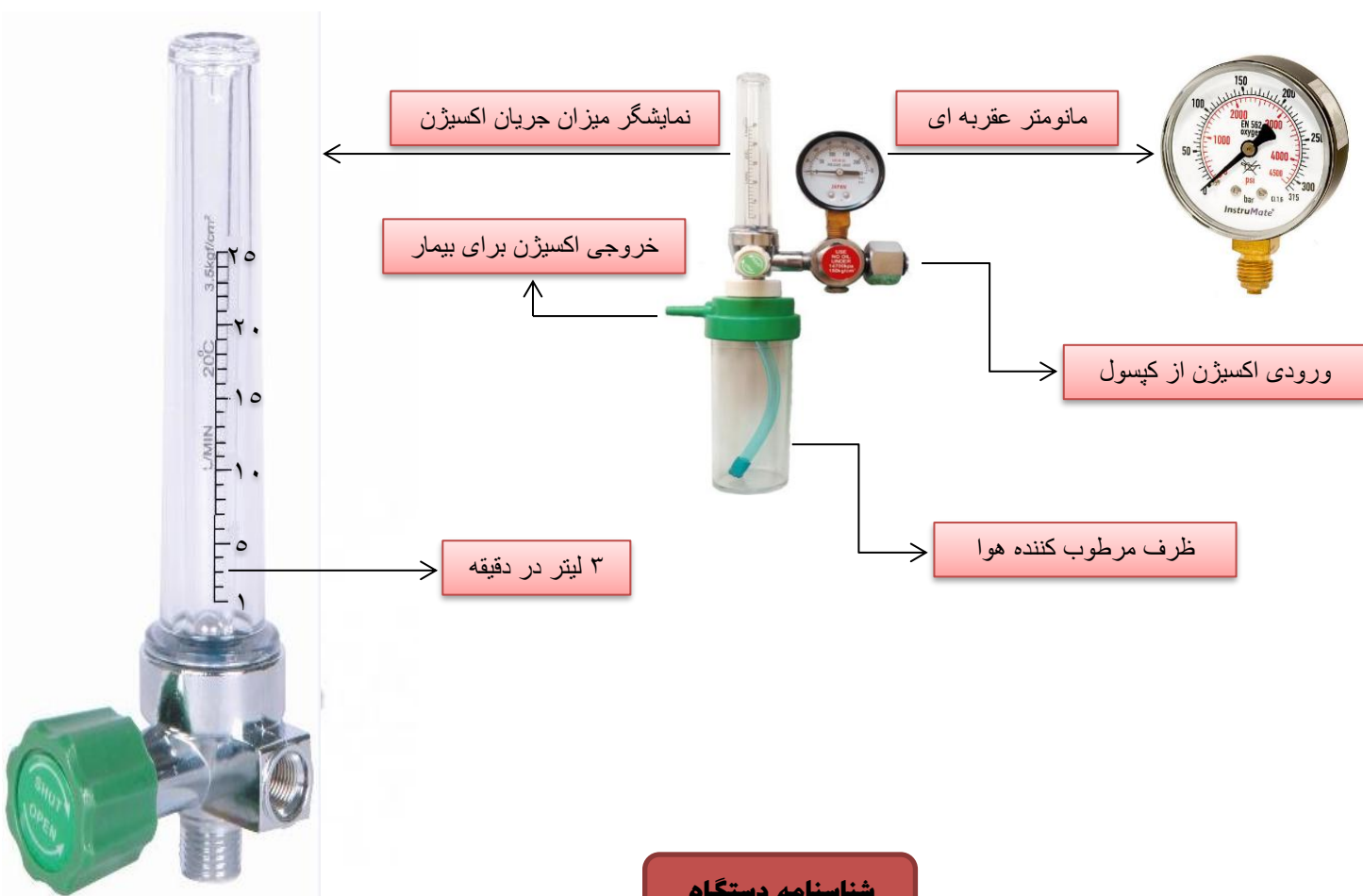

شناسنامه دستگاه

نام دستگاه:	کپسول اکسیژن	شماره سریال:	
مارک/کشور:	ایران	شماره اموال:	
مدل:		شرکت پشتیبان:	

تهیه شده در واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان همدان

دستورالعمل شماره ۷

(تجهیزات پزشکی)