

نکات لازم جهت استفاده از میز قدسنج اطفال



میز قدسنج اطفال *mdf* از ۳ قسمت عمده به شرح ذیل تشکیل شده است:

۱- محل قرار گیری اطفال جهت سنجش میزان قد

۲- محل قرار گیری ترازوی اطفال

۳- دو کشو در قسمت زیرین

نحوه نگهداشت میز قدسنج اطفال

در موارد غیر ضروری از جابجایی میز خودداری فرمایید.

از قرار دادن اجسام نامرتبط در محل اندازه گیری اطفال یا ترازوی اطفال خودداری فرمایید.

از تمیز کردن متر آلومینیومی با الکل (به علت پاک شدن اعداد) خودداری فرمایید.

نحوه کار با میز قدسنج اطفال

کودک را در محل مخصوص اندازه گیری روی تشک قرار دهید (مراقب آسیب به شاخص اندازه گیری پلاستیکی باشید).

محل دقیق خوانش اندازه اطفال مطابق تصویر زیر در سمت راست شاخص اندازه گیری نمایش داده شده است.

جهت سنجش میزان دقت اندازه گیری میتوانید از متر پارچه ایی مطابق عکس زیر استفاده کنید.



شناسنامه دستگاه

نام دستگاه:	کابین نمونه گیری	شماره سریال:
مارک/کشور:	ایرانی	شماره اموال:
مدل:		شرکت پشتیبان:

تهیه شده در واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان همدان

(تجهیزات پزشکی)

دستورالعمل شماره: ۱۵